

LE PATCH D'ACUPUNCTURE INNOVANT

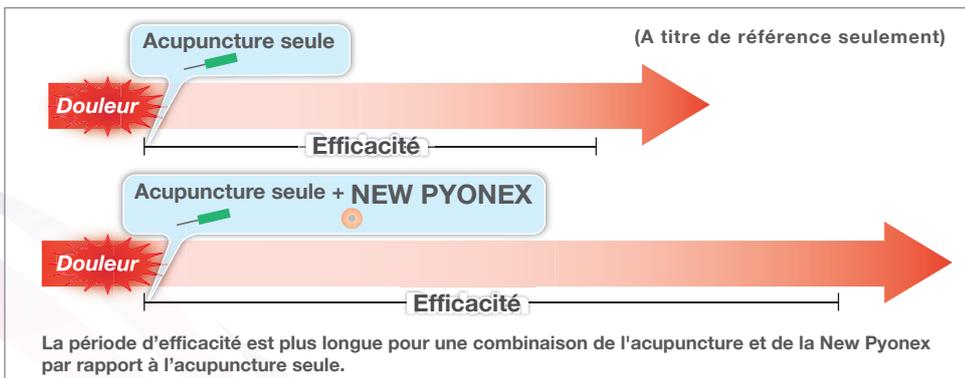
# NEW PYONEX

**NEW PYONEX** est une aiguille d'acupuncture de type patch qui peut être maintenue en toute sécurité sur le corps

## Caractéristiques

- Aiguille sous cutanée à tête ronde, totalement innovante pouvant être utilisée quasiment partout sur le corps.

Appliquée après un traitement d'acupuncture traditionnel, New Pyonex maintient ses effets pendant une période prolongée, même pendant le sommeil.



- Une utilisation sûre et indolore

La longueur d'aiguille de 0,3 à 1,5 mm, permet une acupuncture indolore.

- Application simple

**NEW PYONEX** s'applique facilement sur un ou plusieurs points d'acupuncture suivant les symptômes. Une auto application est rendue possible, sous la supervision d'un praticien médical qualifié.



## gamme de produits

| Code couleur  | Orange | Jaune | Vert | Bleu | Rose |
|---------------|--------|-------|------|------|------|
| Longueur (mm) | 0.3    | 0.6   | 0.9  | 1.2  | 1.5  |
| Diamètre (mm) | 0.2    | 0.2   | 0.2  | 0.2  | 0.2  |
|               |        |       |      |      |      |



# Le patch NEW PYONEX s'utilise après un traitement d'acupuncture traditionnel.

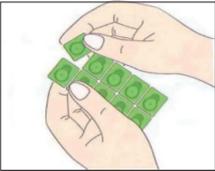
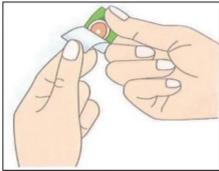
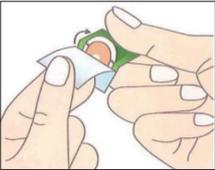
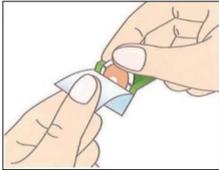
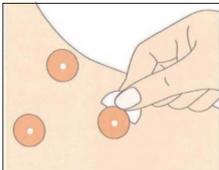
Exemple d'applications

## Traitement d'un mal de tête

Appliquer les patches **NEW PYONEX** recommandés sur les points d'acupuncture ci-dessous afin d'atténuer une céphalée de tension. L'efficacité thérapeutique est maintenue pendant une période prolongée.



### Comment l'appliquer ?


-   
Détacher une cartouche stérile, scellée.
-   
Retirer l'opercule.
-   
Plier la cartouche.
-   
Saisir l'autocollant du patch et la protection de papier ronde avec les doigts, et décoller progressivement.
-   
Désinfecter la zone d'application à l'alcool. Appliquer le patch sur la peau sans décoller le papier de protection.
-   
Après l'application, enlever le papier de protection. Appuyer légèrement sur le patch afin de s'assurer que l'aiguille a été correctement placée dans la peau.

### Le produit et son emballage

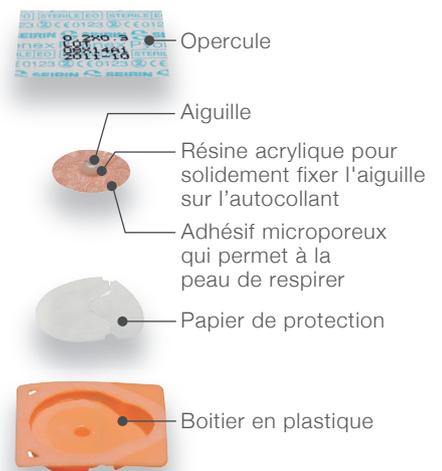**NEW PYONEX** est un dispositif sûr et hygiénique qui garantit un placement et un maintien en toute sécurité ! Tous nos produits sont fabriqués au Japon avec des contrôles de qualité strictes, certifiés ISO13485: 2003.

### Prudence

- New Pyonex est à usage unique.
- Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement la notice afin de connaître les possibles contre indications.



CE 0123 Tous les produits SEIRIN sont testés et certifiés CE et correspondent aux exigences de qualité et aux normes de sécurité du TÜV.

**SEIRIN CORPORATION**

1007-1 SODESHI-CHO SHIMIZU-KU SHIZUOKA-CITY SHIZUOKA 424-0037 JAPAN  
URL : <http://www.seirin.jp>

Distribué par: